



# **MANUAL DE USUARIO**

## **GABINETE DE DEFIBRILADOR**



# MANUAL DE USUARIO GABINETE DEA

## PRÓLOGO

Este manual ha sido traducido y confeccionado para el usuario final y el responsable encargado de la mantención y configuración de los gabinetes de desfibrilador.

1. Lea atentamente las instrucciones de uso.
2. Su producto ha sido revisado por nuestra compañía previo a la entrega con el fin de ratificar el correcto funcionamiento de la unidad.
3. Si presenta algún problema o duda, comuníquese directamente con nuestra compañía al correo de su ejecutiva de ventas, o a [ventas@startfire.cl](mailto:ventas@startfire.cl).
4. El modelo de batería utilizada por este sistema de alarma es de 9v alcalina.
5. La duración nominal de batería es de 1 año.
6. El gabinete incluye de fábrica un documento simple de las instrucciones entregadas en este manual.
7. Su gabinete incluye dos juegos de llaves únicas.
8. Las garantías son limitadas por fallas de fábrica por tiempo 2 años desde la facturación del producto, cualquier intervención a su sistema de alarma y estructura finaliza este beneficio. ( Las condiciones de garantía serán evaluadas por la compañía de acuerdo a sus protocolos expuesto de manera oficial en su página web oficial [www.startfire.cl](http://www.startfire.cl)). La garantía no incluye daños por traslado.


Santiago, Noviembre de 2022.



# MANUAL DE USUARIO GABINETE DEA

## INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN DE ALARMA Y LUZ GABINETE PARA DESFIBRILADOR.

Hay 3 configuraciones para la alarma y la luz de advertencia en el gabinete.

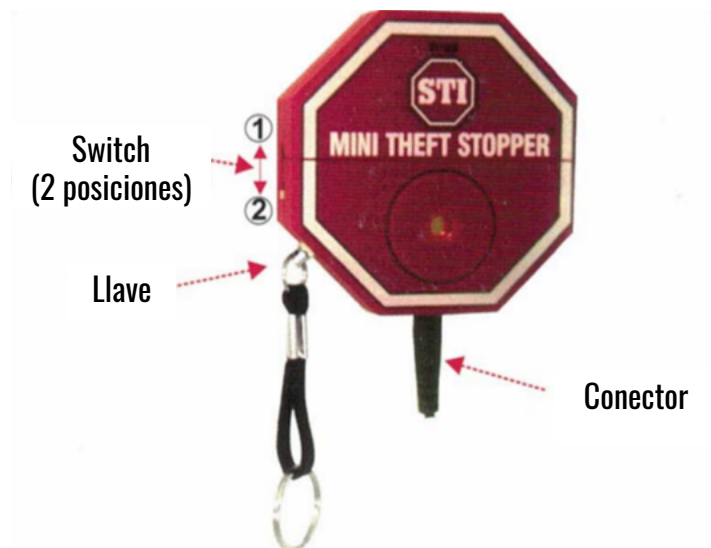

### 1.- Alarma / Luz Se activa cuando el gabinete se abre y continúa cuando el gabinete está cerrado.

- Retire la llave y déjela en el gabinete o en un lugar seguro.
- Coloque el interruptor en la posición 1 como se muestra en la imagen.
- Para detener la alarma, inserte la llave.

### 2.- Alarma / Luz activada cuando se abre el gabinete, pero se detiene cuando se vuelve a cerrar el armario.

- Retire la llave y déjela en el gabinete o en un lugar seguro.
- Coloque el interruptor en la posición 2 como se muestra en la imagen.
- Alarma / sonará solo cuando el gabinete esté abierto.


### 3.- Alarma / Luz no activada

- Deje la llave dentro de la unidad "Mini theft Stopper".



# MANUAL DE USUARIO GABINETE DEA

## INSTRUCCIONES DE CAMBIO DE BATERÍA DE ALARMA Y LUZ GABINETE PARA DESFIBRILADOR.

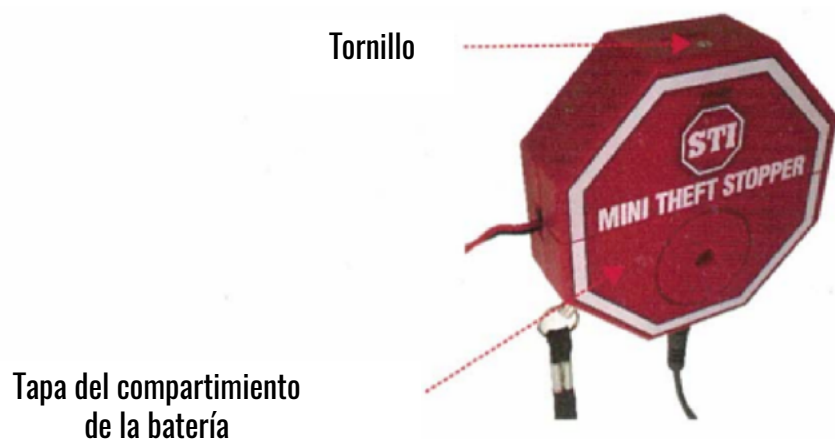

### Reemplazar la batería:

1. Para que salga el tornillo de la alarma.
2. Retirar la tapa del compartimiento de la batería.
3. Reemplazar batería nueva.
4. Tapar el compartimiento de la batería y luego utilizar el tornillo para fijar la alarma.

